



ViTri:CPR Mask



Produktbeskrivning:

Andningsmask av pockettypp, för mun till maskandning. Den är avsedd att användas endast av personer som har fått adekvat utbildning. Masken är utrustad med oxygen-anslutning om extra syrgas behöver tillföras och ett resårband som kan fixera masken vid spontanandning. Levereras komplett med backventil och filter förpackad i ask. Backventilen är utbytbar.

Användningsområde:

Används vid igångsättning av andning vid olycksfall, chock eller annan skada där andning påverkats. Kan även användas vid utbildning i HLR för att åskådliggöra tekniken vid muntill-mask andning. För utbildningsändamål kan det av hygienskäl vara lämpligt att varje kursdeltagare får en egen backventil. OBS, återanvändning endast efter användning i utbildningssyfte.

Rengöring:

Masken (men inte backventilen) kan rengöras. Tvätta den noggrant med diskmedel och ljummet vatten. Dränk därefter masken i en desinfektionslösning i enlighet med lokala hygieninstruktioner för plast. Ex vis kan perättiksyra, klor eller alkohol användas. Masken kan även diskas i max 90 grader C. Obs att rengöring med alkohol och/eller hög värme kan förkorta maskens livslängd. Om det finns tecken på skador i materialet skall masken kasseras.

Artikelnummer	Beskrivning
21188	Andningsmask, i ask, 100 st/trpfp
21187	Backventil till cprmask